

GYNECOLOGICAL THERAPY PLASTER

妇科烫熨灸贴

Postpartum Uterine Contraction Pain

Dysmenorrhea

Gynecological Inflammation

产后宫缩疼痛 / 痛经 / 妇科炎症

Fast Self-heating Painless Treatment

强力自热 / 持续治疗

专利产品 仿冒必究

专利号 ZL201020145723.8

12⁺
小时



BIOLZEN® 倍洛生®

Carefond
凯丰医疗

重庆凯丰医疗器械有限公司
Chongqing Kaifeng Medical Instrument Co., Ltd

重庆市渝中区北区路55号24-7
T 023-63788540 63788541
F 023-63788185 P 400013

E-mail : sales@carefond.com
Http : www.carefond.com

GYNECOLOGICAL THERAPY PLASTER

妇科烫熨灸贴



01 趋势

能量治疗 创新科技


能量疗法是一种通过特殊能量辐射激发并加快自身组织修复的治疗方法。该疗法在国外医学界得到广泛的应用并取得优秀的临床效果。能量疗法的特点及优势：

- 传统药品需进入人体新陈代谢系统，通过胃肠道等脏器进行吸收，通过肝肾等脏器分解排出。而能量疗法是通过体表浅层组织产生作用，不会增加人体脏器的负荷，更不会有化学物质残留体内。
- 能量疗法主导的是正向引导作用，而不是传统药品的强行控制作用。提高自身组织修复能力和自身免疫力是能量疗法的主旨。
- 它既可以独立治疗，也可以联合其他治疗方法(西医或中医)。治疗方式组合灵活，与其它治疗方式互补而不冲突。

02 技术

什么是非均匀式排布TDP技术

非均匀式排布TDP专利技术(专利号: ZL201020145723.8)是在重庆凯丰医疗器械有限公司原有专利“聚能TDP辐射器(专利号: ZL200420006182.5)”的基础上作出的技术延伸。使其特定波谱覆盖区域更广更均匀，既对较大面积区域的治疗有更好的适应性，也对特定部位或穴位进行重点治疗，大幅提高了妇科疾病的治疗效果。

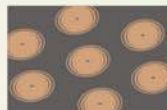

非均匀式排布TDP专利技术
专利号: ZL201020145723.8


03 产品

产品特点

- 能量治疗、创新科技
- 倍洛生® 妇科烫熨灸贴是一种物理治疗，应用我司专利技术，集TDP能量疗法、中医灸疗、烫熨治疗、穴位贴敷疗法于一体，四效合一，直达病灶。
- 医生可以加用透皮吸收的辅助药物，以加强治疗效果。(本品不含有任何药物或化学成分，不会与任何药物产生化学反应，可放心联合使用)。但注意切勿将液体直接浇淋，涂抹在本产品上，因为水分可能改变发热剂的化学性质，是发热的温度和持续时间发生改变。

- 本产品仅在医院销售，保持产品的渠道专一性。患者在专业医师的指导下使用本品，能获得更佳的治疗效果。

- 本品所采用的材料均为出口级医用专业材料，具备相关的资质证书，提高医疗过程中的安全性和稳定性
- 倍洛生® 妇科烫熨灸贴采用Anti-leakage技术，消除了对皮肤和衣物的污染。
- 倍洛生® 妇科烫熨灸贴采用波形粘胶技术，透气度好，透气更均匀，持粘性更好，致敏率更低。
- 自行发热的速度更快，起效更快。热量衰减曲线更平缓，有效使用时间更长。

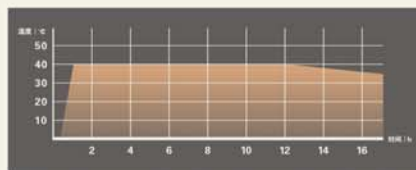

04 应用

认证

- 我司生产的灸疗贴系列产品已通过南德TUV的ISO13485质量体系认证和CE欧盟安全认证，并销往全球二十多个国家。十余年专注于能量贴剂的生产和销售，产品品质值得信赖。

用法与用量

倍洛生® 妇科烫熨灸贴的使用应在专业医师的指导下进行，根据病人的具体情况选择合适的治疗方案。独立治疗和联合治疗都可以达到理想的治疗效果。

产品使用前，应先清洁患处皮肤，以保证粘贴稳固。使用过程中，应避免挤压产品。患者禁止将其他物品(如：胶带、绷带等)缠绕、捆绑或覆盖于本产品上。

医师在给患者治疗时，每次各患部(穴位)使用一贴

适用范围

适用于18岁以上人群，用于产后宫缩疼痛、痛经、妇科炎症及其引发的痛症的辅助治疗。

05 参考

储存：密闭，置阴凉干燥处。如发现包装破损或袋内发热剂结为硬块，将不能使用。

包装规格：4、6、8贴/盒

保质期：3年

生产企业许可证号：渝食药监械生产许20150002号

注册证号：渝食药监械(准)字2014第2260097号

注册产品标准号：YZB/渝 0092-2014

收费项目	收费编码
灸法	440000001
隔物灸法	440000002
烫熨治疗	470000013
贴敷疗法	410000001
磁热疗法	430000020
穴位贴敷治疗	430000023
红外灸治疗	340100001
中药硬膏热贴敷治疗	470000010

06 企业

十年专注十年专业

重庆凯丰医疗器械有限公司成立于2004年，位于中国最年轻的直辖市、西南重镇——重庆，是一家集科研、生产、销售、服务、投资于一体的高科技企业。我司与中国人民解放军第三军医大学、重庆医科大学展开广泛、深入的临床合作，成功取得聚能TDP、非均匀式排布TDP等多项专利技术，并在其基础上，研制出针对各种慢性疾病与疼痛的辅助治疗器械。我司生产的灸疗贴系列产品已通过南德TUV ISO13485和CE认证。各种衍生产品覆盖国内千余家大小医院并出口20多个国家与地区。

我司十年专注于消耗型辅助治疗医疗器械的研、产、销。拥有良好的技研平台和销售渠道。愿与社会各界朋友广泛合作，并肩前进。

使用图示



注意事项

- 个别患者在治疗过程中出现灸泡是个别皮肤耐受性差异导致的，属于正常现象。应及时擦用紫草油(紫草油溶液)或遵医嘱，并暂停使用本产品，直至灸泡消除。
- 个别患者在治疗过程中出现黏胶部位过敏是个别皮肤对胶体的反应，属于正常现象。应及时暂停使用本产品。
- 禁忌症：转移性肿瘤、活动性结核、治疗部位出血、局部感染或传染性皮肤疾病、治疗部位皮肤破损、皮肤感觉障碍、体弱发热、孕妇、严重糖尿病患者。

文献

- 付绪珍，中西医结合治疗慢性盆腔炎60例。2010 14-178-1
- 阿仙古丽·迪里夏提·艾尼瓦尔，穴位注射结合TDP治疗慢性附件炎的疗效观察。2008 01-0029-02
- 文娜探讨远红外穴位热敷对妇科疾病之成效，2009 12 (b) -153-01
- 葛莉萍、陈琳 远红外胶贴穴位贴敷对产后康复的疗效观察，2012 03-0024-02
- 程绍鲁 烫熨疗法，人民卫生出版社2010.4
- 杨景发、徐景智等，红外理疗的机理探讨与红外理疗仪的发展前景分析。红外技术，1999，(11)：9-13

BIOLZEN® 倍洛生®